

## MANTENIMIENTO DEL ES-218

Un mantenimiento oportuno es la clave para prevenir problemas inesperados en el Equipo.


### Empezar a Trabajar:

- Conectar el equipo a un No-break de 1000W ó más.
- Encender el equipo.
- Encender la computadora.
- Esperar que el equipo termine el proceso de estabilización de la lámpara y temperaturas durante 20 minutos.
- Mientras tanto revisar que tengamos agua destilada suficiente y limpia, y revisar que el bote de desecho este vacío.
- Colocar los reactivos destapados en su totalidad en la parte asignada en el equipo y verificar previamente tener el reactivo suficiente para correr las pruebas.


### Mantenimiento Diario

#### Al iniciar el día

- Realizar 5 limpiezas de la siguiente forma:

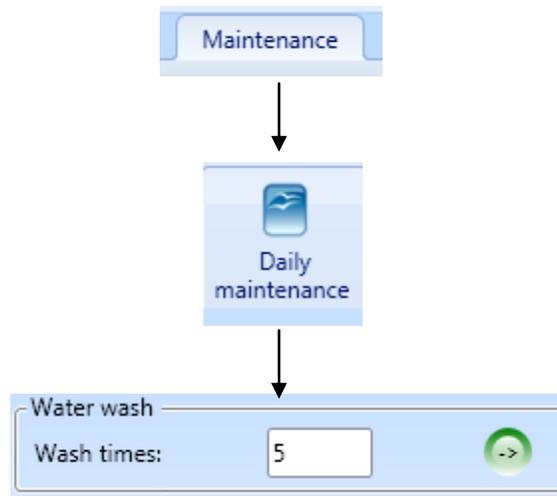

- Realizar prueba de blanco como se muestra

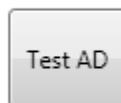

[www.desego.com](http://www.desego.com)

Autopista Morelia-Pátzcuaro km 8.5 #8668 Col. Monterubio.  
CP 58088 Morelia Mich. Tel (01443)3-20-68-64

Tenemos que esperar que los valores de AD por longitud de onda sean entre 20,000 a 60,000.

- El equipo estará listo para utilizarse, se recomienda comenzar con el **Control de Calidad** para verificar que este midiendo correctamente de lo contrario realizar **Calibración** para ajustar.

### Fin de día

- Realizar la limpieza al final del día seleccionando las siguientes opciones.



- Podemos apagar el equipo y cerrar el programa.
- Limpiar las puntas de arriba hacia abajo con una gasa y alcohol y movimientos suaves, cuidando que no queden residuos de tela.

### Mantenimiento Semanal


- Realizar lavados con solución de cloro al 10% y colocarlos en la posición 30 e indicarle al equipo las siguientes ordenes:



Detergent wash

Detergent position:  Detergent volume:  Wash times:  

- Después de este lavado realizar uno extra como se indica:

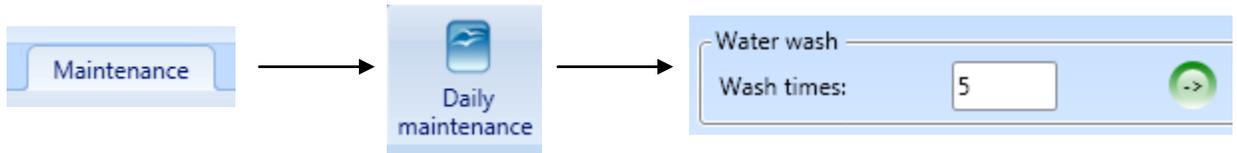

- Podemos apagar el equipo

### MANTENIMIENTO MENSUAL

- El mantenimiento mensual incluye los procesos de los mantenimientos diarios y semanales.
- Limpiar externamente el equipo por debajo y alrededor del equipo para evitar acumulaciones de polvo dentro del equipo.

### MANTENIMIENTO ANUAL

- El mantenimiento se tendrá que realizar al año de uso por el personal **Autorizado de DESEGO** exclusivamente, favor de comunicarse al departamento de servicio para la Coordinación del Mantenimiento Preventivo al siguiente numero. Tel 443 3206864 y 65