


MANTENIMIENTO AUTOKEM II

Un mantenimiento oportuno es la clave para prevenir problemas inesperados en el Equipo.

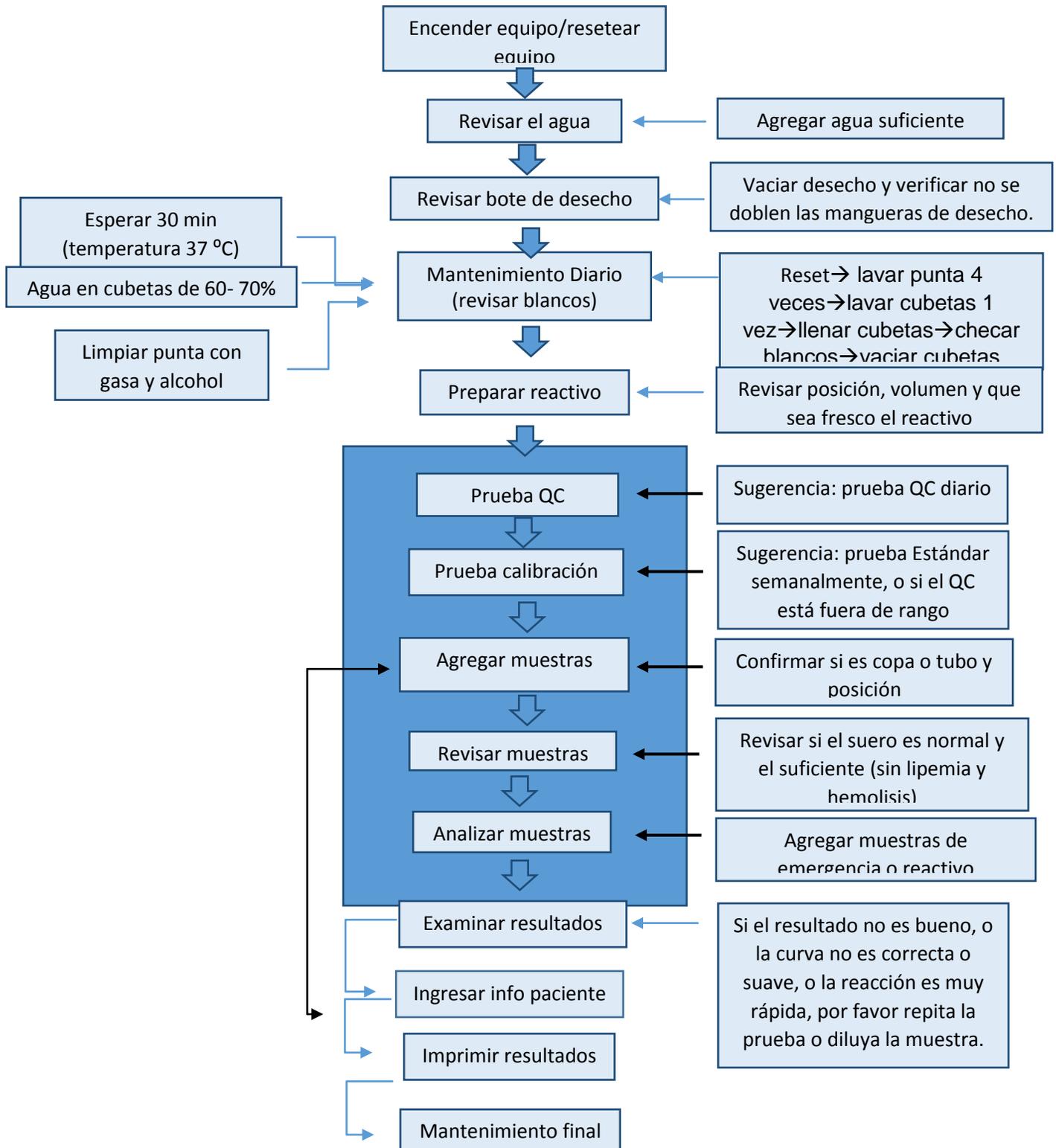

Empezar a trabajar: Online → reset → lavar agujas 4 veces → lavar estación de lavado 4 veces → llenar cubetas de reacción → checar blanco y guardar → vaciar cubetas → reset
Dejar de trabajar" : Online → reset → lavar agujas 4 veces → lavar cubetas 1 vez → llenar cubetas

Mantenimiento diario

- Revisar que el contenedor de agua tenga suficiente y el contenedor de desecho vacío.
- Precalentar 30 minutos, realizar "iniciar trabajo".
- Limpiar puntas con gasa y alcohol.
- Después de las pruebas, realizar "dejar de trabajar"
- Revisar a menudo el volumen de cubetas cerca del 70% de su capacidad.
- Hacer el mantenimiento "probe maintenance" 3 veces (limpieza con detergente en la posición 40).

Mantenimiento semanal

- Realizar "mantenimiento diario".
- Limpiar todas las puntas con gasa y alcohol.
- Limpiar botes de reactivo (para evitar cristales) de igual forma el bote de agua desionizada.
- Limpiar polvo y suciedades en la superficie del equipo.
- Revisar a menudo que el volumen de cubetas este cerca del 70% de su capacidad.
- Realizar "probe maintenance" (Utilizar detergente, cloro al 10% y verificar que este el contenedor por arriba del 30% en la posición 40).
- Revisar cubetas, el agua residual es menor en las cubetas después de lavadas.

Mantenimiento Mensual

- Realizar "Mantenimiento semanal".
- Sacar las cubetas y limpie la superficie exterior con papel suave para lentes o toalla de microfibra para anteojos.
- Verificar el volumen de las cubetas que este al 70%.
- Colocar la manguera de agua en recipiente con detergente y lavar las puntas 4*3 veces y lavar estación de lavado 6 veces; esperar un día con el detergente y cambiar a agua, lavar estación de lavado 4 veces, lavar agujas 4*3 veces y por lo menos 1 vez las cubetas de reacción.
- Después de 3 meses cambie las cubetas.
- Revise que el secado de las cubetas sea correcto.
- El primer servicio del equipo será realizado a los 4 meses de uso.

Mantenimiento Anual

- El mantenimiento se tendrá que realizar al año de Uso por el personal **Autorizado de DESEGO** exclusivamente, favor de comunicarse al departamento de servicio para la Coordinación del Mantenimiento Preventivo al siguiente número. Tel 443 3206864 y 65.

www.desego.com

Autopista Morelia-Pátzcuaro km 8.5 #8668 Col. Monterubio.
CP 58088 Morelia Mich. Tel (01443)3-20-68-64