

MANTENIMIENTO ELIREAD

Un mantenimiento oportuno es la clave para prevenir problemas inesperados en el Equipo.

Empezar a Trabajar: Conectar el equipo a un No-break de 500W. Encender el equipo e ingresar al menú de Prueba (Test), seleccionar la prueba a realizar, colocar los micropozos en el plato de prueba e iniciar con la misma. Todos los procedimientos de pipeteo e incubación se realizan fuera del equipo.

Mantenimiento Diario

Fin de día

- Realizar la limpieza en el lugar donde se coloca la placa con un paño seco.

Mantenimiento Semanal

- Limpieza externa con un paño humedecido con agua destilada a excepción de la pantalla, la cual no se debe mojar bajo ninguna circunstancia.

NOTA: es importante no utilizar cloro, ni detergentes alcalinos ni ácidos.

Mantenimiento Mensual

- El mantenimiento mensual incluye los procesos de los mantenimientos diarios y semanales.

Mantenimiento Anual

- El mantenimiento se tendrá que realizar al año de Uso por el personal **Autorizado de DESEGO** exclusivamente, favor de comunicarse al departamento de servicio para la Coordinación del Mantenimiento Preventivo al siguiente número. Tel 443 3206864 y 65

www.desego.com

Autopista Morelia-Pátzcuaro km 8.5 #8668 Col. Monterubio.

CP 58088 Morelia Mich. Tel (01443)3-20-68-64

Procedimiento de Envío

- Retirar todos los pozos y el carrusel del interior del equipo, limpiar el interior del mismo.
- Llenar el Formato de Envío y colocarlo dentro de la caja del Equipo.
- Colocar perfectamente el equipo, en su caja original, con sus respectivos empaques y bolsa. En dando caso de no tener los empaques originales, llamar al Área de Servicio para que le expliquen el procedimiento correcto del envío.
- No enviar el equipo con los siguientes accesorios: Reactivos, Teclado, Mouse, Mangueras y Cable toma Corriente. En dado caso de que sea necesario, El especialista se lo indicara.
- Enviar el equipo por RedPack a la dirección siguiente: Autopista Morelia-Pátzcuaro km 8.5 #8668 Col. Monterubio, en dado caso de no encontrar Monterubio lo podrán encontrar como Emiliano Zapata o Tenencia Morelos el CP 58088, Morelia Mich Tel 443 3206864 y 65 .

www.desego.com

Autopista Morelia-Pátzcuaro km 8.5 #8668 Col. Monterubio.

CP 58088 Morelia Mich. Tel (01443)3-20-68-64