

MANTENIMIENTO DEL EKEM

Un mantenimiento oportuno es la clave para prevenir problemas inesperados en el Equipo.

Empezar a Trabajar: Conectar el equipo a un No-break de 500W ó más. Encender el equipo y aspirar agua desionizada, ya que el valor del blanco de agua sea correcto (no marque alarma) proseguimos a correr control de calidad para las pruebas que vayamos a correr en el día, y si alguna no pasa el control, realizar calibración o el ajuste de los factores de las pruebas. Después de eso podemos analizar las muestras.

Mantenimiento Diario

- Mantener el ambiente de trabajo del equipo limpio.
- Limpiar la pantalla con un trapo limpio, suave y seco.
- Realizar la limpieza indicada al momento de indicarle al equipo que se apague, se realizara con abundante agua destilada.
- Entre cambios de analitos la limpieza será requerida de igual forma con agua destilada.
- Realizar el apagado normal.

Mantenimiento Semanal

- Se debe realizar al final de la semana laboral antes de apagar el equipo colocando bajo la manguera de aspiración **solución de alcohol al 30%**, aspirarlo con la tecla "rinse".
 - durante 15 segundos y dejarlo durante 5 minutos dentro del equipo.
 - (La tecla rinse se activa con un clic y se desactiva de la misma manera)
- Pasado los 5 min enjuagar el equipo con abundante agua destilada durante un minuto presionando la tecla rinse (arriba indicada).
- Realizar el apagado normal, de nueva cuenta nos pedirá limpieza la cual realizaremos.

NOTA: es importante no utilizar cloro, ni detergentes alcalinos ni ácidos.

Mantenimiento Mensual

- El mantenimiento mensual incluye los procesos de los mantenimientos diarios y semanales.
- Limpiar externamente el equipo, alrededor y debajo del equipo para evitar acumulaciones de polvo dentro del equipo.

Mantenimiento Anual

El mantenimiento se tendrá que realizar al año de Uso por el personal **Autorizado de DESEGO** exclusivamente, favor de comunicarse al departamento de servicio para la Coordinación del Mantenimiento Preventivo al siguiente número. Tel 443 3206864 y 65

Procedimiento de Envío

- Realizar una limpieza de la celda con agua destilada durante dos mins., presionando la tecla RINSE para comenzar y para terminar, presionar nuevamente el botón RINSE para aspirar aire durante 30 segs., luego presionarlo de nuevo para que termine la aspiración. Apagar el equipo y desconectar el cable toma corriente del equipo. Introducir la manguera de aspiración dentro del equipo para que no se dañe durante el transporte.
- Llenar el Formato de Envío y colocarlo dentro de la caja del Equipo.
- Colocar perfectamente el equipo, en su caja original, con sus respectivos empaques y bolsa. En dando caso de no tener los empaques originales, llamar al Área de Servicio para que le expliquen el procedimiento correcto del envío.
- No enviar el equipo con los siguientes accesorios: Reactivos, Teclado, Mouse, Mangueras y Cable toma Corriente. En dado caso de que sea necesario, El especialista se lo indicará.
- Enviar el equipo por RedPack a la dirección siguiente: Autopista Morelia-Pátzcuaro km 8.5 #8668 Col. Monterubio, en dado caso de no encontrar Monterubio lo podrán encontrar como Emiliano Zapata o Tenencia Morelos el CP 58088, Morelia Mich Tel 443 3206864 y 65 .