

## MANTENIMIENTO DEL FIB 2000

Un mantenimiento oportuno es la clave para prevenir problemas inesperados en el Equipo.

**Empezar a Trabajar:** Conectar el equipo a un No-break de 500W ó más. Encender el equipo, esperar la estabilización de la temperatura durante 20 min; Correr el control de calidad y procesar las muestras.

### Mantenimiento Diario

Para mantener el equipo en buenas condiciones, deberá dar mantenimiento diario el cual consiste en:

- Mantener el ambiente de trabajo del equipo limpio.
- Puede usar un paño húmedo y seco para limpiar la superficie del equipo.

### Mantenimiento Semanal

- Limpiar los canales de lectura y pocillos de incubación con aire comprimido de manera vertical.

### Mantenimiento Mensual

- El mantenimiento mensual incluye los procesos de los mantenimientos diarios y semanales.
- Limpiar externamente el equipo, alrededor y debajo del equipo para evitar acumulaciones de polvo dentro del equipo.
- Realizar una limpieza con aire comprimido en el canal de lectura, cuidando mantener el bote del aire totalmente vertical para que no salga líquido del mismo.

## Mantenimiento Anual

El mantenimiento se tendrá que realizar al año de uso por el personal **Autorizado de DESEGO** exclusivamente, favor de comunicarse al departamento de servicio para la coordinación del mantenimiento preventivo al siguiente numero. Tel 443 3206864 y 65

## Procedimiento de Envío

- Realizar Limpieza externa, retirar cualquier copa o reactivos y apagar el Equipo.
- Llenar el Formato de Envió y colocarlo dentro de la caja del Equipo.
- Colocar perfectamente el equipo, en su caja original, con sus respectivos empaques y bolsa. En dando caso de no tener los empaques originales, llamar al Área de Servicio para que le expliquen el procedimiento correcto del envío.
- No enviar el equipo con los siguientes accesorios: Reactivos, Teclado, Mouse, Mangueras y Cable toma Corriente. En dado caso de que sea necesario, El especialista se lo indicara.
- Enviar el equipo por RedPack a la dirección siguiente: Autopista Morelia-Pátzcuaro km 8.5 #8668 Col. Monterubio, en dado caso de no encontrar Monterubio lo podrán encontrar como Emiliano Zapata o Tenencia Morelos el CP 58088, Morelia Mich Tel 443 3206864 y 65 .