

kitlab

MANUAL

DE USUARIO

Incinerador

Agujas ND-55



Kitlab

Manual del Usuario

Incinerador de Agujas ND-55

1. Conecte el cable principal al enchufe eléctrico.
2. Presione el switch en la parte trasera del panel para encender. La lámpara verde “Power on” se activara.
3. Inserte la aguja en el hueco que dice “BURNER” y presione. La aguja se empezara a incinerar. Continúe presionando y moviendo para destruir la aguja.
4. Coloque la jeringa en el hueco que dice “CUTTER” y sosténgala. Corte firmemente con las navajas la jeringa en un solo movimiento. La jeringa se cortara de donde se sostiene la aguja. (Para presionar la manija cortadora, coloque su primer dedo en la manija cortadora, coloque su primer dedo en la manija y el dedo pulgar en la parte frontal de instrumento y jale el dedo hacia usted).
5. Jale el deposito de desecho usando el botón frontal y deseche la aguja incinerada y los pedazos de jeringa y viértalos en desechos peligrosos.
6. Retire el deposito de desecho y utilice el LIMPIADOR DE ELECTRODO una vez por semana para limpiar el electrodo.

Si el instrumento no enciende después de presionar el botón de encendido, entonces verifique el fusible en la parte trasera y reemplácelo con uno nuevo de 2 Amp.