

kitlab

# MANUAL DE USUARIO

## Agitador Pipetas PSK-6



Kitlab

## Manual de Uso Agitador de Pipetas PSK-6

1. Conecte la fuente de alimentación.
2. Coloque pipetas mezcladoras de sangre en el "titular" (1).
3. Seleccione el modelo de interruptor. Usted puede colocar el "switch" (2) en "TEMPORIZADOR", "OFF" o "ON". Cuando el "interruptor" se encuentra en o posición "TIMER" en "ON", el indicador "POWER" (3) luces.

Observaciones: Tiempo - Después de colocar el "interruptor" en la posición "TIMER", puede activar la función "TIEMPO" (4) a una escala requerida. Hay un sonido de campana para que se oiga cuando el tiempo de fraguado es final.

\* ¿Cómo establecer el "TIMER" (4) correctamente?

Gire el "TIMER" (4) sobre la escala requerida, a continuación, volver a la calibración de tiempo como una escala requerida. (Por ejemplo, usted necesita 5 minutos para la rotación, pero necesita viento a escala 7 u 8 minutos en un primer momento, y luego volver de nuevo a escala de 5 minutos.)

ON - Es un dispositivo libre de tiempo, cambie a "OFF" y luego se detiene.

OFF - Power cortada.

### Diagrama de Circuito

