

kitlab

# MANUAL DE USUARIO

## Contador Mecanico RBC-01



Kitlab

## Utilidad del CONTADOR DIGITAL

Su CONTADOR ha sido diseñado para ofrecerle un instrumento confiable, preciso y exacto en el conteo de 8 grupos de células de la diferencia; tiene nueve lectores que le permiten observar en línea la cuenta de las 8 fracciones y del total.

## Especificaciones Técnicas

Capacidad                      9 canales

## Medidas de seguridad

Usted ha adquirido un producto **KitLab** el cual ha sido diseñado cuidadosamente para ofrecerle un equipo FUNCIONAL, CONFIABLE Y SEGURO. Ahora esperamos que usted contribuya con la parte que a usted le corresponde leyendo cuidadosamente este manual para que instale y opere correctamente su:

### CONTADOR MECANICO RBC-01

## PRECAUCIONES

Consejos para un buen uso de su equipo:

1. Si accidentalmente se derramasen líquidos sobre su contador RBC-01 séquelo con un paño húmedo y suave.

## INSTALACIÓN

- ❖ Desempaque su CONTADOR
- ❖ Póngalo sobre una superficie sólida.
- ❖ Evite los rayos de sol directos.

## OPERACION

1. Observe que todos los lectores estén en cero si gire la perilla roja.
2. Oprima hasta el fondo la tecla correspondiente a la célula observada.

3. Continúe el conteo hasta llegar a 100, se escuchará un sonido.
  4. En cada uno de los ocho lectores observará el % de cada fracción y en el lector superior se registra el TOTAL.
- ❖ Para limpieza de su CONTADOR utilice un paño Húmedo.

8 Lectores de Fracciones

Lector del TOTAL



Teclas de Conteo

## RECOMENDACIONES:

- a) Instale su equipo en una superficie sólida.