

kitlab

# MANUAL DE USUARIO

## Mezclador Plaquetas RPK-48



Kitlab

## Manual de Operación

### Mezclador Plaquetas RPK-48

1. Conecte firmemente el cable de corriente al equipo y después conecte la clavija al socket 120 Volts / 60 Htz.
2. Deslice la placa interna, donde vaya a colocar las muestras a agitar y distribúyalas uniformemente. Deslice la placa a su posición original.
3. Lleve el switch a la posición ON (Encendido), el equipo empezará la agitación automáticamente.

## Manual de Servicio

### Tabla de Problemas

**Precaución:** Siempre desconecte el equipo de la corriente eléctrica antes de solucionar un problema.

Problema	Causa	Solución
Equipo no enciende	Cable toma corriente no conectado	Conecte el cable a instrumento y corriente
	No hay corriente eléctrica	Conecte a otra toma eléctrica
	Fusible fundido	Cambie el fusible
El contenedor no se mueve	El motor está defectuoso	Contacte a su distribuidor

### Diagrama de Circuito

