

kitlab **MANUAL**
DE USUARIO

Mezclador

Plaquetas RPK-96



Manual de Operación

Mezclador Plaquetas RPK-96

1. Conecte firmemente el cable de corriente al equipo y después conecte la clavija al socket 120 Volts / 60 Htz.
2. Deslice la placa interna, donde vaya a colocar las muestras a agitar y distribúyalas uniformemente. Deslice la placa a su posición original.
3. Lleve el switch a la posición ON (Encendido), el equipo empezará la agitación automáticamente.

Manual de Servicio

Tabla de Problemas

Precaución: Siempre desconecte el equipo de la corriente eléctrica antes de solucionar un problema.

Problema	Causa	Solución
Equipo no enciende	Cable toma corriente no conectado	Conecte el cable a instrumento y corriente
	No hay corriente eléctrica	Conecte a otra toma eléctrica
	Fusible fundido	Cambie el fusible
El contenedor no se mueve	El motor está defectuoso	Contacte a su distribuidor

Diagrama de Circuito

